

機械器具12 理学診療用器具

* 管理医療機器 人体開口部用超音波プローブカバー * JMDN 70015000

プローブカバー・G

再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

- 再使用禁止。複数の患者に使用しないこと。

＜適用対象＞

- 過去に天然ゴムによるアナフィラキシー症状様の既往歴がある医療関係者及び患者への使用は禁止。

【形状・構造及び原理等】

本品は天然ゴムラテックス製の滅菌済経腔用プローブカバーである。




【使用目的又は効果】

超音波診断装置の探触子(プローブ)に本品を被せ、体腔内(腔内)に挿入します。滅菌、ディスポーザブル化することによってプローブの汚染を防ぎ、医療従事者及び患者間の交差感染を防ぎます。

【使用方法等】

1. プローブの先端(超音波発信部)に超音波用ゼリーを適量滴下します。
2. 本品をその上に置きます。その時に本品の巻き方向に注意してください。(逆向きに置くと巻きほぐせなくなります。)
3. 本品をくるくる巻きほぐしながら、プローブ全体に被せまします。被せ終わったらプローブグリップ部と本品の端を一緒に握り、本品を固定します。その際、本品を引っ張りぎみに握り、プローブ先端と本品との間の空気を除去してください。(空気が入っていると画像に影響します。)
4. プローブと本品を一緒に握ったまま操作します。

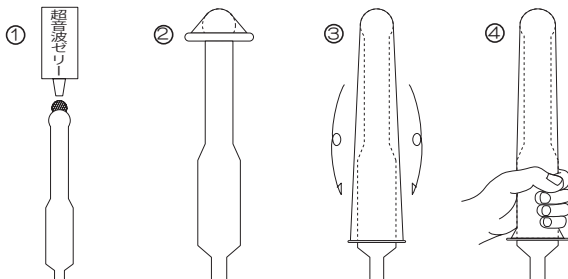

【使用上の注意】

＜使用注意＞

- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、じんましん、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な措置を施してください。
- 天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。

＜重要な基本的注意＞

- * ● 本品は経腔プローブ用のカバーです。その他のプローブでの使用はやめてください。また、装着時に張力のかからないサイズのプローブを使用してください。
- 包装を開封したらすぐに使用してください。
- 刃物等鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますのでご注意ください。
- プローブ抜去後は、プローブカバーを確認し、破れている場合は、プローブが汚染されている恐れがありますので、感染等に留意し適切な措置を施してください。

＜その他＞

- 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので確認の上使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 水ぬれに注意し、直射日光、高温や湿気をさけて保管してください。

＜有効期間＞

- 滅菌後2カ年(箱と個包装に有効期間が記載されています。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

不二ラテックス株式会社

〒328-0006 栃木県栃木市国府町150

TEL. 0282-27-5656